

BAUSCH + LOMB

Boston ADVANCE® Cleaner

Denne indlægsseddel indeholder vigtig informasjon. Læs indholdet omhyggeligt og gem sedlen til fremtidig brug.

Specifikt sammensat til Stabile Gaspermeable kontaktlinser i Fluoro Silikoneakrylat og Silikoneakrylat.

Daglig anvendelse af BAUSCH & LOMB Boston ADVANCE® Cleaner modvirker opbygning af besværlige belægnings, der forværrer bærekomforten med stabile gaspermeable linser.

• Specifikt sammensat for anvendelse sammen med Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution.

Innhold: Aktivt komponent: Alkylsulfat for overfladerengøring (8,0% w/v)

Øvrige ingredienser: Natriumklorid, natriumfosfat, ikke-ionisk alkoholbaseret overfladerengøring, kiselgelløsning; med titaniumdioxid.

BRUGSANVISNING:

1. Vask dine hænder, inden du rører linserne.
2. Læg linsen i din håndflade, gnub forsigtigt begge sider af linsen med nogle dråber Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner i 20 sekunder.
3. FJERN ALLE SPOR AF CLEANEREN VED AT SKYLLE OMHYGGELIGT I OVERENSSTEMMELSE MED DE INSTRUKTIONER, DU HAR FÅET AF DIN KONTAKTLINSEOPTIKER.
4. Læg linsen i opbevaringsetuiet og hæld frisk Conditioning Solution på, så linsen bliver dækket. Opbevares i væsken i mindst 4 timer (eller natten over), inden du anvender linserne igen.

HVIS DU FÅR CLEANER I ØJET, TAG DA LINSERNE UD OG SKYL STRAKS ØJET MED RINDENDE POSTEVAND, TIL CLEANEREN ER SKYLLET HELT VÆK. HVIS DU FØLER UBEHAG, HAR ØGET TÅRESTRØM, SYNSFORANDRINGER, ELLER FÅR RØDE ØJNE, TAG STRAKS KONTAKT TIL DIN KONTAKTLINSEOPTIKER.

Forsigtighedsforanstaltninger:

- Genbrug aldrig væsker.
- LÆG ALTID LINSERNE I BLØD I CONDITIONING SOLUTION. LÆG ALDRIG LINSERNE I BLØD I CLEANER. SKYL ALTID LINSERNE OMHYGGELIGT (SOM DIN KONTAKTLINSEOPTIKER HAR INSTRUERET DIG I) EFTER RENGØRING MED CLEANER, OG INDEEN DU LÆGGER DEM I CONDITIONING SOLUTION.
- Lad aldrig flaskens top komme i kontakt med noget, eftersom dette kan kontaminere væsken.
- Luk flasken ordentligt, når den ikke anvendes.
- Vask og skyl altid dine hænder, inden du rører linserne.
- Anvend produktet inden den udløbsdato, der er markeret på flasken.

Advarsel:

DENNE OPLØSNING ER IKKE BEREGNET TIL ANVENDELSE DIREKTE I ØJET.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke produktet efter udløbsdatoen.

Anvend ikke produktet, hvis forseglingen mangler eller er brudt.

Anvend ikke produktet, hvis du er allergisk over for nogen af komponenterne.

Kasser resterende væske 3 måneder efter at flasken blev åbnet første gang.

IKKE BEREGNET TIL ANVENDELSE TIL BLØDE KONTAKTLINSE.



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman St.,
Rochester NY 14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated

106 London Road,
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Tillvered i Italien/Valmistettu Italiassa/Fremstillet i Italien/Produsert i Italia
®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
© Bausch & Lomb Incorporated

BAUSCH + LOMB

Boston ADVANCE® Cleaner

Denne følgeseddelen inneholder viktig informasjon. Les innholdet grundig, og ta vare på den for senere bruk.

Spesifikt sammensatt for stabile gasspermeable kontaktlinser av fluoro-silikonakrylat og silikonakrylat.

Daglig bruk av BAUSCH & LOMB Boston ADVANCE® Cleaner motvirker oppbygning av vanskelig belegg som reduserer komforten ved bruk av stabile gasspermeable linser.

• Spesifikt sammensatt for bruk sammen med Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution.

Innhold: Aktivt komponent: Alkylsulfat for overfladerengjøring (8,0 % w/v) Annet innhold: Natriumklorid, natriumfosfat, ikke-ionisk alkoholbasert overfladerengjøring, kiselgelløsning; med titaniumdioxid.

BRUKSANVISNING:

1. Vask hendene før du håndterer linserne dine.
 2. Legg linsen i håndflaten, gni hver side av linsen forsiktig med noen dråper Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner i 20 sekunder.
 3. FJERN ALLE SPOR AV CLEANEREN VED Å SKYLLE GRUNDIG I HENHOLD TIL KONTAKTLINSEOPTIKERENS ANVISNINGER.
 4. Legg linsen i oppbevaringsetuiet, og fyll på med fersk Conditioning Solution til linsevæsken dekker linsen. Oppbevar linserne i etuiet i minst 4 timer (eller over natten) før du benytter dem igjen.
- HVIS DU FÅR CLEANER I ØYET, TA UT LINSEN OG SKYLL STRAKS ØYET I RENNENDE VANN TIL RENGJØRINGSMIDDELET ER HELT BORTE. KONTAKT STRAKS DIN KONTAKTLINSEOPTIKER HVIS DU OPPLEVER UBEHAG, ØKT TÅREPRODUKSJON ELLER SYNSEDRINGER, ELLER FÅR RØDE ØYNE

Forsiktighetsregler:

- Bruk aldri samme væsken flere ganger.
- BLØTLEGG ALLTID LINSENE I CONDITIONING SOLUTION. BLØTLEGG ALDRIG LINSENE I CLEANEREN. SKYLL ALLTID LINSENE GRUNDIG (I HENHOLD TIL KONTAKTLINSEOPTIKERENS ANVISNINGER) ETTER RENGJØRING MED CLEANER OG FØR DU LEGGER DEM I CONDITIONING SOLUTION.
- La aldri flasketoppen komme i berøring med noe, fordi dette kan forurense væsken.
- Lukk flasken skikkelig når den ikke er i bruk.
- Vask og skyl hendene før du håndterer linserne dine.
- Bruk alltid produktet før utløpsdatoen som står på flasken.

Advarsel:

DENNE LØSNINGEN ER IKKE BEREGNET PÅ BRUK DIREKTE I ØJET.

Opbevares utilgjengelig for barn.


Må ikke brukes etter utløpsdatoen.

Ikke bruk produktet hvis forseglingen mangler eller er brutt.

Ikke bruk produktet hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene.

Kast eventuell væske som er igjen 3 måneder etter at flasken ble åpnet første gang.

IKKE BEREGNET PÅ BEHANDLING AV MYKE KONTAKTLINSE.

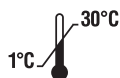

CE 0050



STERILE A

3959100