

BOSTON SIMPLUS® Multi-Action Solution

Denne indlægseddell indeholder vigtig information. Vær venlig at læse den omhyggeligt, og gem den til evt. senere brug.

Spesielt sammensatt Til Stabile Gaspermeable Kontaktlinser af Fluorosilikonacrylate og Silikonakrylat materialer

Beskrivelse og Bruksanvisning: Boston SIMPLUS® Multi-Action Solution er et nyskabende produkt til rengjøring, desinfisering og oppbevaring av stabile gaspermeable (RGP) linser. Den er godkjent til rengjøring av gaspermeable linser i fluorosilikonakrylat og silikonakrylat materialer. Boston SIMPLUS® Multi-Action Solution fjerner protein og fett fra linseoverflaten, og hjelper også med holde linserne fri for kraftige belægninger. Denne væske er også utformet til skylning av linserne, hvilket eliminerer løse overflatebelægninger på linsen. Et flerpolymert komfortsystem gjør at linserne føles komfortable ved isætning, og forbedrer fugtningen. Et patentert fugtende emne bibeholder lensens fugtighet. Denne formulering er sammensatt for at gi en lindrende effekt på dine øyne. Den inneholder også et konserveringsystem, som har en bevist effekt, når det gjelder at ødelægge skadelige organismer. Denne væske er effektiv ved både rengjøring og desinfisering, og samtidig kompatibel med dine øyne ved isætningen.

INNOLD: En steril vannbasert, buffret oppløsning, som inneholder poloxamin, hydroxyalkylfosfonat, borsyre, natriumborat, natriumklorid, hydroxypropylmetyl cellulose, Glucam og er konserveret med klorhexidylglukonat (0.003%), polyaminopropylbiguanid (0.0005%).

BRUGSANVISNING:

Fjern forseglingen. Anvend ikke væsken hvis forseglingen er brutt eller savnes.

1. For at være sikker på korrekt desinfisering, skal alle trin i nedenstående liste følges: Vask dine hender med en mild sæbe. (OBS – flydende sæbe i pumpeflasker kan inneholde oliebaserede emner.)
2. Placer linserne i det tomme linseuiet, og fyll det med frisk Boston SIMPLUS® Multi-Action Solution. Lad linserne ligge i blød i minst fire (4) timer, eller natten over, inden du anvender dem.
3. Etter iblødning tages linserne ud af linseuiet. Gni begge sider af linsen omhyggeligt med to (2) til fire (4) dråber Boston SIMPLUS® Multi-Action Solution i håndfladen i tyve (20) sekunder. Separat daily cleaner er ikke nødvendig.
4. Skyl i cirka fem (5) sekunder med en jævn stråle Boston SIMPLUS® Multi-Action Solution for at fjerne løse belægninger fra overfladen, (OBS: anvend ikke postevand) og sæt linserne på øjnene.
5. Rengør omhyggeligt indersiden af linseuiet med varmt vand, og lad det lufttørre efter hver anvendelse. Advarsel: For at undgå kontaminering, må flaskens åbning ikke komme i kontakt med noget. Tilslut flasken ordentligt når den ikke anvendes.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

- Anvend ikke produktet, hvis du er allergisk overfor nogle af ingredienserne.
- Må ikke anvendes til bløde (hydrofile) kontaktlinser.
- De anbefalinger du får af din kontaktlinseoptiker skal følges. Hvis du ikke følger disse rutiner, kan dette resultere i alvorlige øjeninfeksjoner.
- Rør ikke ved flaskens åbning, og lad den ikke komme i kontakt med noget, heller ikke dine øyne, da dette kan forurense væsken, eller skade dine øyne.
- Vask alltid dine hender inden du håndterer dine linser.
- Genanvend aldrig væsken. Anvend alltid frisk væske til rengjøring og desinfisering af dine linser.
- Hav alltid flasken lukket når du ikke anvender den, for at undgå kontaminering eller fordampning.
- Anvend ikke øjenmedicin i forbindelse med denne væske, uden din læges anbefaling.
- Kassér evt. resterende væske 3 måneder efter åbning.
- Må ikke anvendes efter udløbsdato.
- OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.
- Linseuiet kan være en viktig årsag til mikrobiell kontaminering og øjenirritation. Linseuiet skal rengøres med en overflate rengjøringsvæske til kontaktlinser, skylles med varmt vand og lufttørre uten lag, hver dag. Linseuiet skal udskiftet jævnligt.

VIGTIGT: Hvis der oppstår irritation eller kraftig tårevæskeproduksjon, som vedbliver eller forværrer, eller hvis visus nedsættes, afbryd brugen af linser og kontakt omgående med din kontaktlinseoptiker.



Bausch & Lomb Incorporated
1400 N. Goodman St.
Rochester NY 14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road,
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Tillverad i Italien
Valmistettu Italiassa

©/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. © Bausch & Lomb Incorporated

BOSTON SIMPLUS® Multi-Action Solution

Denne folder inneholder viktig informasjon. Vennligst les den nøye og spar den.

Spesielt sammensatt for stabile gaspermeable kontaktlinser av fluorosilikonacrylate og silikonakrylatmateriale

Beskrivelse og Bruksanvisning: Boston SIMPLUS® Multi-Action Solution er et nyskabende produkt for rengjøring, desinfisering og oppbevaring av stabile gaspermeable (RGP) linser. Den er godkjent for bruk til gaspermeable linser i fluorosilikonakrylat og silikonakrylatmateriale. Boston SIMPLUS® Multi-Action Solution fjerner protein og fett fra linseoverflaten og hjelper også til å fjerne kraftige linsebelegg. Denne væske er også utformet for skylning av linsene, og eliminerer løse overflatebelegg på linsen. Et flerpolymert komfortsystem gjør at linsene føles komfortable ved innsetting og forbedrer fuktningen. Et patentert fuktende stoff opprettholder linsenes fuktighet. Denne formulering er tatt frem for å ha en lindrende effekt på dine øyne. Den inneholder også et konserveringsystem, som har bevist effekt når det gjelder å ødelegge skadelige organismer. Denne væske er effektiv ved både rengjøring og desinfisering, og samtidig kompatibel med dine øyne ved innsettingen.

INNOLD: En steril vannbasert, buffret løsning, som inneholder poloxamin, hydroxyalkylfosfonat, borsyre, natriumborat, natriumklorid, hydroxypropylmetyl cellulose, Glucam og er konserveret med klorhexidylglukonat (0.003%), polyaminopropylbiguanid (0.0005%).

BRUGSANVISNING:

Ta bort forseglingen. Bruk ikke væsken hvis forseglingen er brutt eller mangler.


1. For å forsikre deg om korrekt desinfisering må alle trinn følges på listen nedenfor: Vask hendene med mild sæpe. (OBS – flydende såpe på flaske kan inneholde oljebaserte stoffer.)
2. Plassér linsene i det tomme linseuiet og fyll på fersk Boston SIMPLUS® Multi-Action Solution. La linsene ligge i væsken i minst fire (4) timer eller over natten før du bruker dem.
3. Etter bløtlegging, ta ut linsene av linseuiet og gni begge sider av linsen nøye med to (2) til fire (4) dråper Boston SIMPLUS® Multi-Action Solution i håndflaten i tjue (20) sekunder. Separat daily cleaner trengs ikke.
4. Skyll i omtrent fem (5) sekunder under en jevn stråle med Boston SIMPLUS® Multi-Action Solution for å fjerne løse belegg fra overflaten (OBS: Vanlig vann trengs ikke) og sett linsene i øynene.
5. Rengjør nøye innsiden av linseuiet med varmt vann og la det lufttørre hver dag. Advarsel: For å unngå kontaminering, må flaskeåpningen ikke komme i kontakt med andre gjenstander. Lukk flasken ordentlig når den ikke brukes.

FORSIKTIGHETSTILTAK:

- Bruk ikke produktet hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene.
- Må ikke brukes til myke (hydrofile) kontaktlinser.
- De anbefalinger du får av din kontaktlinseoptiker må følges. Hvis du ikke følger disse rutiner kan dette resultere i alvorlige øyeninfeksjoner.
- Rør ikke flaskeåpningen og la den ikke komme i kontakt med noen gjenstand eller øynene fordi det kan forurense løsningen eller skade øynene dine.
- Vask alltid hendene før du håndterer dine linser.
- Bruk aldri samme væske mer enn én gang. Bruk alltid fersk løsning for rengjøring og desinfisering av linsene.
- Lukk alltid flasken når du ikke bruker den for å unngå kontaminering eller avdunsting.
- Bruk ikke øyenmedisiner sammen med denne løsning uten samråd med lege.
- Kast resterende løsning 3 måneder etter åpning.
- Må ikke brukes etter utgangsdato.
- OPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
- Linseuiet kan være en viktig grunn til mikrobiell kontaminering og øyeirritasjon. Linseuiet skal rengjøres med en overflaterengjøringsvæske for kontaktlinser, skylles med varmt vann og lufttørre med lokkene av hver dag. Linseuiet skal byttes ofte.

VIKTIG: Hvis irritasjon eller kraftig tåreflom oppstår, som vedvarer eller blir verre, eller hvis synsskarpheten forandres, avbryt linsebruken og ta umiddelbart kontakt med din kontaktlinseoptiker.

CE 0050

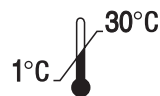

STERILE A

3959900